


奎斯邁 伯雷斯克手術刀片安全移除系統



【產品使用說明】


- 單手操作手術刀片移除器，集刀片移除與銳器收集功能於一體；只需將刀片輕鬆推進移除器直到“卡嗒”一聲，刀片即會自動離刀柄，完成移除。
- 內建刀片收納計數器，可收納最多100片的刀片 (由100倒數,裝滿時會顯示 "FULL" 如圖示)。當刀片填滿移除盒後，內置的機制便會自動鎖住插槽口(裝滿時插入口自動關閉並顯示"斑馬線"如上圖示)，防止內入過滿的刀片。
- 刀片移除盒具備堅固的外殼，可使其安全地棄入銳器收集容器內。

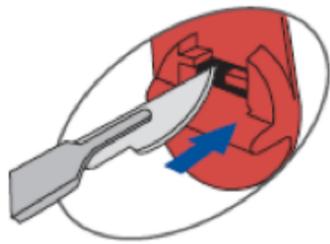

1. 以單手將手術刀平放，刀片銳利面朝右的方向



2. 握住手術刀柄輕輕推送入刀片移除器內
直至出現卡嗒聲。

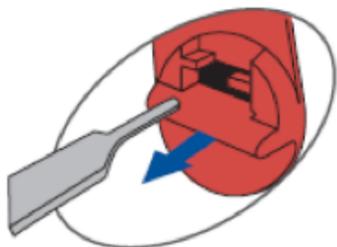

3. 直接抽出手術刀柄即可安全地完成刀片移除。